

EASY MIXING

歯科用アルギン酸塩印象材 アルジュースーパー



＜アルジュースーパー＞は、印象材としてご満足いただける機能を備え、特に操作性を追求し、非常に練り易い製品となっています。
また、振動による粉の沈みを小さくし、計量のバラツキが少なくなるように設計してあります。

【硬化性及び色調】 **ファスト(グリーン)** / **ノーマル(ピンク)** / スロー(ホワイト)

【包装】 5kg 入 (1kg×5 袋)、2kg 入 (1kg×2 袋)

【用途】 アルギン酸塩の可溶性塩を主成分とする印象材で、口内内の印象採得に使用する。

【成分】 アルギン酸カリウム、アルギン酸ナトリウム、ケイソウ土、硫酸カルシウム、流動パラフィン、着色材、香料等

管理医療機器(クラスⅡ) JIS T 6505 「歯科用アルギン酸塩印象材」粉末状 医療機器認証番号: 218AKBZX00086000



製造販売元・製造元

株式会社 **ユ-デント**

〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地
TEL.043-213-8151 FAX.043-213-8152
製造販売業許可番号 12B2X10001

歯科用アルギン酸塩印象材 <アルジュースーパー>

【特長】

1. 粉末のポリウムが大きいので1袋あたりの使用回数が多い

粉末のポリウムが大きく、1床分の印象採得に使用する量が14gと少なくてすみます。このため1kg袋の使用回数が70回分に相当し、大変お得です（一般的な市販品は1床分の使用量が約16gであり、1kg袋では60回分に相当）。

2. イージーミキシング

水と良くなじみ、軽いタッチで練和が行え、ダマダマができずに短時間で滑らかなペーストが得られます。

3. 効果的なチキントロピー性

トレーからの垂れが少なく、圧接した印象材は細部まで行きわたり、トレー辺縁の印象も正確に採得できます。

4. 連合印象にも最適

寒天印象材と強固に安定した接着力があり、確実な連合印象採得が可能です。

5. 高弾性で型崩れしにくい

撤去時の変形が少なく、動揺歯にも優しい印象材です。


6. 高い耐薬品性

印象採得後の薬液消毒（アルギン酸塩印象材用）による影響も受けにくくなっています。

7. 高精度で滑沢な模型の製作

硬石こうはもちろん、レジン系減水剤を配合してある超硬石こうにも最適です。

<計量基準>

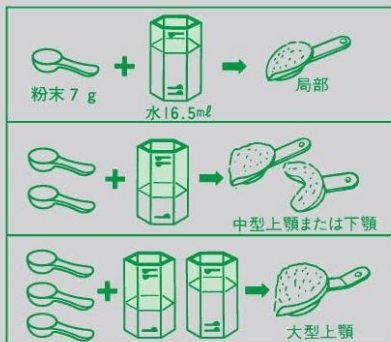

<使用方法>

- 1) 標準混水量: 粉末 14g(計量スプーン 2 杯)に対し水 33ml
- 2) 計量スプーンと水計量器を使用し、30~40秒で均一に練和してください。
*計量器セットをご入用の方はお申し付け下さい。
- 3) 練和後トレーに盛り、表面を平らにした後、口くう内で圧接し、1分30秒~2分間保持します。
- 4) アルギン酸塩印象材の硬化を確認した後、撤去します。引圧により外れにくい場合には、エアーを吹き込みながら撤去してください。
- 5) 口くう内から撤去し、流水で洗浄後、余剰水分を除き、できるだけ速やかに石こうを注入してください。


<使用上の注意>

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 粉末は、計量前によくほぐしてから採取すること。
- ② アルミバック開封後は、吸湿を防ぐため、密閉できる容器にわけかえ、使用後はすぐにフタを閉めること。
- ③ アルギン酸塩印象材用自動練和器使用の場合は、18~20℃の練和水を使用し、操作時間に余裕のあるノーマルセットまたはスローセットをお薦めします。
- ④ 使用する石こうは、歯科用硬質石こうを使用しますが、超硬質石こうを使用する場合は水が多いと面荒れが起きますので、模型作成に支障のない範囲で、できるだけ水の少ないほうが滑沢な面が得られます。

- ・その他の使用上の注意については添付文書をご覧ください。
- ・添付文書が必要な方はご請求ください。

<練和物温度と硬化開始時間>

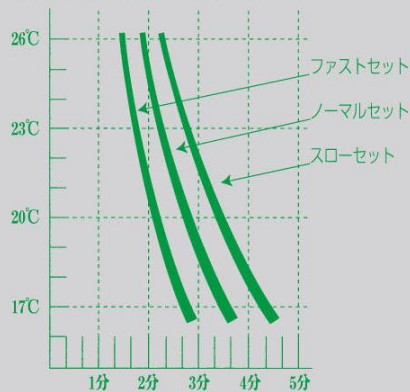

【品目仕様等】

<物理的性質>

試験方法: JIS T 6505・練和物温度 23℃で測定

	ファストセット	ノーマルセット	スローセット
練和時間	30~40秒	30~40秒	30~40秒
トータル操作時間	1分20秒	1分45秒	2分10秒
初期硬化時間	1分40秒	2分05秒	2分30秒
石こうとの適合性	適合	適合	適合
永久ひずみ	2.8%	2.8%	2.8%
弾性ひずみ	11.8%	11.8%	11.8%
圧縮強さ	0.9MPa	0.9MPa	0.9MPa

使用する石こうの種類: 歯科用硬質石こう



製造販売元・製造元

株式会社 ユーデント

〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地

TEL.043-213-8151 FAX.043-213-8152

製造販売業許可番号 12B2X10001

<http://www.youdent.jp>

取扱店名