

新発売

歯科用アルギン酸塩印象材

アルジュースーパー いちご



アルギン酸塩印象材『アルジュースーパー』に<いちご>の香りが新登場！
ミント臭に嘔吐反射される患者様や、強い香料が苦手なお子様・ご年配の方の
印象採得にお勧めです。操作性を追求した非常に練り易い製品となっています。

【硬化性及び色調】 ノーマル(ピンク)

【包装】 1箱 5kg 入 (1kg×5袋)

【用途】 アルギン酸塩の可溶性塩を主成分とする印象材で、口内内の印象採得に使用する。

【成分】 アルギン酸カリウム、アルギン酸ナトリウム、ケイソウ土、硫酸カルシウム、
流動パラフィン、着色材、香料(ストロベリー)等

管理医療機器(クラスⅡ) JIS T 6505 「歯科用アルギン酸塩印象材」粉末状 医療機器認証番号: 218AKBZX00086000



製造販売元・製造元

株式会社 ユーデント

〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地
TEL.043-213-8151 FAX.043-213-8152
製造販売業許可番号 12B2X10001

< アルジュースーパー いちご >

【特長】

1. イージーミキシング

水とのなじみがよく軽いタッチで練和が行え、短時間で滑らかなペーストが得られます。ダストフリーなので練和時に飛散しません。

2. 効果的なチキントロピー性

トレーからの垂れが少なく、圧接した印象材は細部にまで行きわたり、トレー辺縁の印象も正確に採得できます。

3. 連合印象にも最適

寒天印象材と強固に安定した接着力があり、確実な連合印象採得が可能です。

4. 高弾性で型崩れにくい

撤去時の変形が少なく、動揺歯にもやさしい印象材です。

5. 高い耐薬品性

印象採得後の薬液消毒(アルギン酸塩印象材用)による影響も受けにくくなっています。

6. 高精度で滑沢な模型の製作

硬石こうはもちろん、レジン系減水剤を配合してある超硬石こうにも最適です。


【操作方法又は使用方法等】

- 1) 標準混水量：粉末 14 g に対し水 33ml
- 2) 専用の計量スプーンと水計量器を使用し、30～40 秒で均一に練和してください。
- 3) 練和後トレーに盛り、表面を平らにした後、口くう内で圧接し、1分30秒～2分間保持します。
- 4) アルギン酸塩印象材の硬化を確認した後、撤去します。引圧により外れにくい場合には、エアーを吹き込みながら撤去してください。
- 5) 口くう内から撤去し、流水で洗浄後、余剰水分を除き、できるだけ速やかに石こうを注入してください。

	ノーマルセット
練和時間	30～40秒
トータル操作時間	1分45秒
	0.01mm
初期硬化時間	2分2秒
石こうとの適合性	適合
永久ひずみ	2.8%
弾性ひずみ	11.8%
圧縮強さ	0.9MPa

使用する石こうの種類：歯科用硬質石こう

(計量基準)

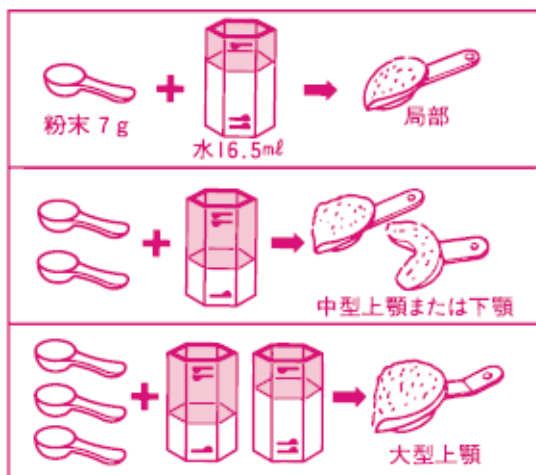

【使用上の注意】

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①粉末は、計量前によくほぐしてから採取すること。
- ②アルミパック開封後は、吸湿を防ぐため、密封できる容器にわけかえ、使用後はすぐにフタを閉めること。
- ③アルギン酸塩印象材用自動練和器使用の場合は10～15秒に設定し、操作時間に余裕を持たせるために、練和水は室温より若干低めの水道水(18℃位)をご使用ください。
- ④使用する石こうは、歯科用硬質石こうを使用しますが、超硬質石こうを使用する場合は水が多いと面荒れが起きますので、模型作成に支障のない範囲で、できるだけ水の少ないほうが滑沢な面が得られます。

計量器及び添付文書は封入されておりません。ご要望の場合はお買い求めの販売店様または弊社までお申し付けください。



製造販売元・製造元

株式会社 ユーデント

〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地

TEL.043-213-8151 FAX.043-213-8152

製造販売業許可番号 12B2X10001

http://www.yodent.jp e-mail:info@yodent.jp

販売店名