

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用焼石こう 70897010

ユーデント普通石こう

【形状・構造及び原理等】

「形状」

該当規格：JIS T 6604「歯科用焼石こう」
タイプ 2 粉末状

「構造」

成分：硫酸カルシウム半水塩、その他
色調：ホワイト

「原理」

本材は、硫酸カルシウムの半水塩を主成分とする歯科用焼石こうで水と練和すると一定時間後に硬化する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用として用いる。

[物理的性質]

標準混水量 (粉 100g に対して)	ml	45~48
硬化時間	min	9~11
圧縮強さ (1hr)	Mpa	15
線硬化膨張 (2hr)	%	0.2~0.25
細線再現性		適合

(試験方法：JIS T 6604)

【使用方法等】

- 1) 標準混水量：粉末 100g に対し水 45~48ml
- 2) 練和時間
 - ①手練和の場合は、均一になるまで練和してください。
練和量により差はありますが 30~60 秒間練和してください。
 - ②真空練和の場合は、粉末を水に馴染ませたあと 30 秒間練和してください。
- 3) 注入後、40~60 分で完全硬化します。

【使用上の注意】

- 技工の用途により混水量を調整して、ご使用ください。
- ①本材を使用する際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないよう注意すること。
 - ②本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐため保護メガネなどの防具を使用すること。
 - ③開封後はできるだけ速やかに使用すること。
 - ④他の製品と混用しないこと。
 - ⑤本材は、歯科用硬質石こうの用途以外に使用しないこと。
 - ⑥本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①本材は、直射日光のあたらない乾燥した涼しいところに保管すること。
- ②開封後は、密封して保管すること。
- ③本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は、包装に記載の有効期間までに使用すること。
* [記載の有効期間は、自己認証（当社データ）による]

【取扱い上の注意】

- ①本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本材を使用しないこと。また、使用により発疹などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ②本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

[包装]

1箱 20kg 入：(ポリ袋内装)

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 株式会社ユーデント
及び製造業者