

機械器具 68 印象採取又は咬合採取用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

ユーデント網トレー

【形状・構造及び原理等】

本品の上にアルギン酸塩印象材を盛り、口腔内の印象採得に使用する器具である。

材質: 真鍮素材にニッケルメッキ

【使用目的、効能または効果】

[使用目的] 印象採得

(適用印象材) アルギン酸塩印象材

【品目仕様等】*

本品は、下記の種類がある。

スーパー		型番	アチ幅	奥行
全顎用	上顎用	A	74mm	64mm
		B	70mm	61mm
	下顎用	A	72mm	62mm
		B	67mm	56mm

レギュラー		型番	アチ幅	奥行	型番	アチ幅	奥行
全顎用	上顎用	AA	71mm	69mm	B	64mm	57mm
		A	70mm	61mm	C	64mm	52mm
	下顎用	AA	71mm	59mm	B	66mm	52mm
		A	70mm	54mm	C	65mm	44mm

レギュラー		型番	アチ幅	奥行
前歯用	上顎用		56mm	40mm
	下顎用		62mm	39mm
片顎用		No.10	35mm	60mm
		No.11	35mm	60mm
局部用			22mm	46mm

公差±5mm

【操作方法または使用方法等】

- 1) 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接します。
- 2) 印象材の硬化後、口腔内から取り出します。
- 3) 使用後は必ず洗浄、滅菌を行ってください。

【使用上の注意】

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①使用前に破損・ヒビ・キズ・変色・腐食・稼働部の動きなどに異常がないか確認してください。
- ②顎形態に合わせて本品を調整する際、急に曲げたり、必要以上に変形させるとメッキが剥がれる場合がありますので、丁寧に取り扱いってください。

[使用注意]

- 1) 使用前または使用後に下記事項に留意して、必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
 - ①薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取扱説明書に書かれた使用上の注意を守ってください。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあります。
 - ②滅菌の際、次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないで下さい。
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン
 - ③洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがあります。
 - ④洗浄・消毒・滅菌後は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管してください。水分が付着していると、サビやシミなどの原因になることがあります。

- ⑤洗浄後、洗剤が残らないように十分すすいでください。
 - ⑥「もらいサビ」を防ぐために、錆びている器具と一緒に滅菌など、行なわないでください。
 - ⑦本品の清掃には、サビの原因となるため、磨き粉、金属ウールや金ブラシの使用は避けてください。
 - ⑧洗浄には歯科器具用防錆洗浄材を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと(金属を腐食させることがある)。
 - ⑨トレークリーナー、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。トレークリーナーによっては、黒ずんだり本品の損傷を早める恐れがあるため、長時間の浸漬を必要とするもの(一晩や一昼夜など)は使用しないこと。
 - ⑩強アルカリ、強酸性の洗浄液及び超酸化水(超酸性水)は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
 - ⑪塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した場合はできるだけ早めに洗浄すること。
 - ⑫加熱滅菌(オートクレーブ滅菌器)の場合、132℃までは本品の損傷に影響はありませんが、それ以上高温になると溶接部分のメッキが剥がれる場合があるので注意すること。
- 2) 破損した本品を使用すると、口腔内を傷つける恐れがあるので使用しないこと。
 - 3) 本品の切削や打刻(自分の名前を入れるなど)などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
 - 4) 本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
 - 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

[重要な基本的注意]

- ①本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- ②本品の使用後は、血液などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ①本品は、清潔な場所に保管すること。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

スーパー

- ①全顎用トレー 上顎 1個 A(大),B(中)
- ②全顎用トレー 下顎 1個 A(大),B(中)

レギュラー

- ①全顎用トレー 上顎 1個 AA(特大),A(大),B(中),C(小)
- ②全顎用トレー 下顎 1個 AA(特大),A(大),B(中),C(小)
- ③前歯用トレー 上顎 1個
- ④前歯用トレー 下顎 1個
- ⑤片顎用トレー 左右 2個
- ⑥局部用トレー 回転 3個

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売元 株式会社ユーデント
及び製造元

住所 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地
製造販売業許可番号 12B2X10001
TEL 043-213-8151 (代)
FAX 043-213-8152